



Cenefom

ENT Series

Wyroby rynologiczne i otologiczne

Cenefom dostarcza pełen zakres produktów na bazie poli(alkoholu winylowego) PVA do otorynolaryngologii (ENT) przeznaczonych do stosowania po operacjach nosa, zabiegach otologicznych i tamowania krwawienia.

Opatrunki nosowe


- Łatwe do zakładania i usuwania
- Delikatnie uciskają zatrzymując krwawienie i szybko wchłaniają krew
- Nie strzępią się i nie pozostawiają włókien
- Miękkie, stabilizujące, antyadhezyjne i niepowodujące podrażnień
- Sterylizowane promieniowaniem gamma
- Pakowane w jałowych warunkach

www.cenefom.com


EUMed

EUMed Sp. z o. o.
ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
tel.: 022 879 69 20, fax: 022 879 69 28,
e-mail: info@eumed.pl www.eumed.pl

Cenefōm OPATRUNEK NOSOWY

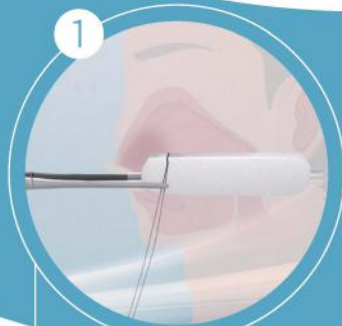


1 Chwyc opatrunek i upewnij się, że znajduje się we właściwej pozycji.

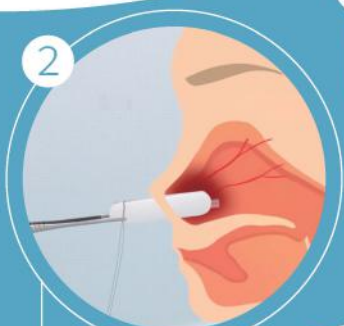

2 Wprowadź opatrunek do jamy nosowej.




3 Użyj strzykawki, by wstrzyknąć zwykły roztwór soli fizjologicznej do jamy nosowej.

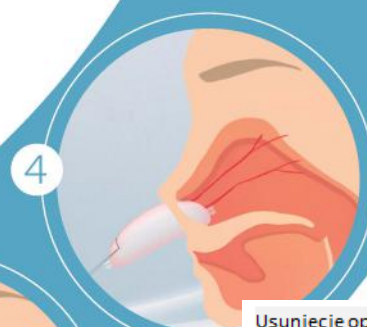

Usunięcie opatrunku powinno nastąpić po 24 - 72 godzinach od zabiegu; przed wyjęciem należy zastosować roztwór soli fizjologicznej w celu zwilżenia opatrunku nosowego.


Skompresowany na sucho dla łatwiejszego wprowadzenia

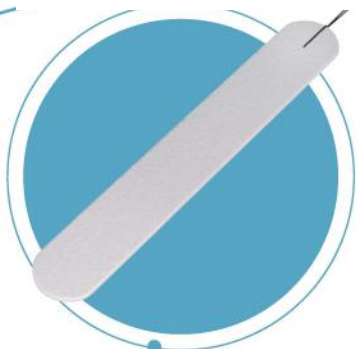


Szybko się rozpręża i delikatnie uciska miejsca, w których doszło do krwawienia



Jednocześnie miękki i stabilizujący ściany jamy nosowej po wchłonięciu krwawienia lub płynu

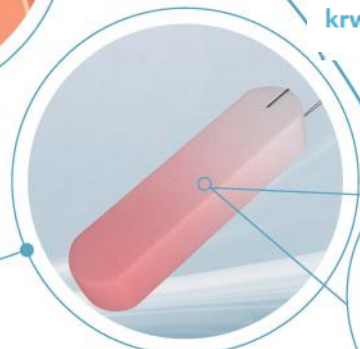

Jednorodna, porowata struktura pianki PVA zapobiega przyleganiu do tkanek

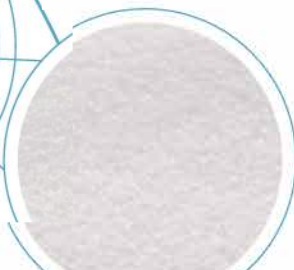

ZALETY

Przeznaczone do stosowania w różnych operacjach nosa: plastyce przegrody, turbinektomii, rynoplastyce i innych. Wypełniają jamę nosową i stabilizują nos podczas zabiegu, umożliwiając płynną wentylację, zapewniając komfort pacjenta.

* Dostępne z kanałem powietrznym lub bez

OPATRUNEK NOSOWY TYP STANDARD



Model	Wymiary D x S x W	Opis	Torebki / Pudełko
NP-LS10S	45x20x10 mm	sznurek, bez kanalik	20
NP-LS15S	45x20x15 mm	sznurek, bez kanalik	20
NP-LS15ST	45x20x15 mm	sznurek, kanalik	10
NP-LL10S	80x20x10 mm	sznurek, bez kanalik	20
NP-LL15S	80x20x15 mm	sznurek, bez kanalik	20
NP-LL15ST	80x20x15 mm	sznurek, kanalik	10

Opakowanie podstawowe: 1 szt./folia

Opakowanie dodatkowe: 1 torebka, folia/ woreczek Tyvek

Przeznaczone do stosowania po operacjach zatok, pomagają utrzymać drożności zatok i kompleksu ujściowo - przewodowego, aby zapewnić przepływ powietrza przez nos. Po umieszczeniu rozprężają się i zatrzymują krwawienie poprzez delikatny ucisk, przyspieszając gojenie. Obłe krawędzie ułatwiają zakładanie opatrunku i zwiększają komfort pacjenta podczas usuwania opatrunku.

OPATRUNEK NOSOWY TYP SINUS



Model	Wymiary D x S x W	Opis	Torebki / Pudełko
NP-SL06S	35x12x6 mm	sznurek	20
NP-SL09S	35x12x9mm	sznurek	20

Opakowanie podstawowe: 2 szt./folia

Opakowanie dodatkowe: 1 torebka, folia/ woreczek Tyvek

Przeznaczone do stosowania w leczeniu krwawienia z przedniej i tylnej części nosa. Miękkie, okrągłe krawędzie opatrunku powodują mniejsze tarcie i redukują podrażnienia podczas wprowadzania go do nosa. Opatrunki rozprężają się, delikatnie uciskając i skutecznie zatrzymują krwawienie z nosa.

TAMPONADA NOSOWA TYP EPISTAXIS



Model	Wymiary D x S x W	Opis	Torebki / Pudełko
NP-ES15S	55x20x10 mm	sznurek	20
NP-EL15S	100x25x15 mm	sznurek	10

Opakowanie podstawowe: 1 szt./folia

Opakowanie dodatkowe: 1 torebka, folia/ woreczek Tyvek

Przeznaczone dla pacjentów, u których potrzeba większej siły do wypełnienia jamy nosowej. Anatomiczne opatrunki nosowe są używane podczas i po operacji nosa. Z opcjonalnym kanałem powietrznym, zwiększającym komfort pacjenta i ułatwiającym oddychanie. Umiarkowane rozmiary i miękka, ale zachowująca sztywność struktura ułatwiają zakładanie i usuwanie.

* Dostępne z kanałem powietrznym lub bez

OPATRUNEK NOSOWY TYP ANATOMICZNY



Model	Wymiary D x S x W	Opis	Torebki / Pudełko
NP-DL10S	80x30x10 mm	sznurek	20
NP-DL15S	80x30x15 mm	sznurek	20
NP-DL15ST	100x25x15 mm	sznurek, kanałik	10

Opakowanie podstawowe: 1 szt./folia

Opakowanie dodatkowe: 1 torebka, folia/ woreczek Tyvek