

PIEZOSURGERY[®] flex

EUMed

EUMed Sp. z o. o.
ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa
tel.: 022 879 69 20, fax: 022 879 69 28,
e-mail: info@eumed.pl



ZASILACZ FLEX

→ IDEALNY START

→ APLIKACJE CHIRURGICZNE


- Chirurgia twarzowo-szczękowa
- Otolaryngologia
- Chirurgia plastyczno- rekonstrukcyjna
- Chirurgia ręki
- Chirurgia stopy



→ IDEALNY START

→ ISTOTA


- Kontrola precyzyjna połączenia
- Kompaktowy i przenośny
- Prosty w użyciu

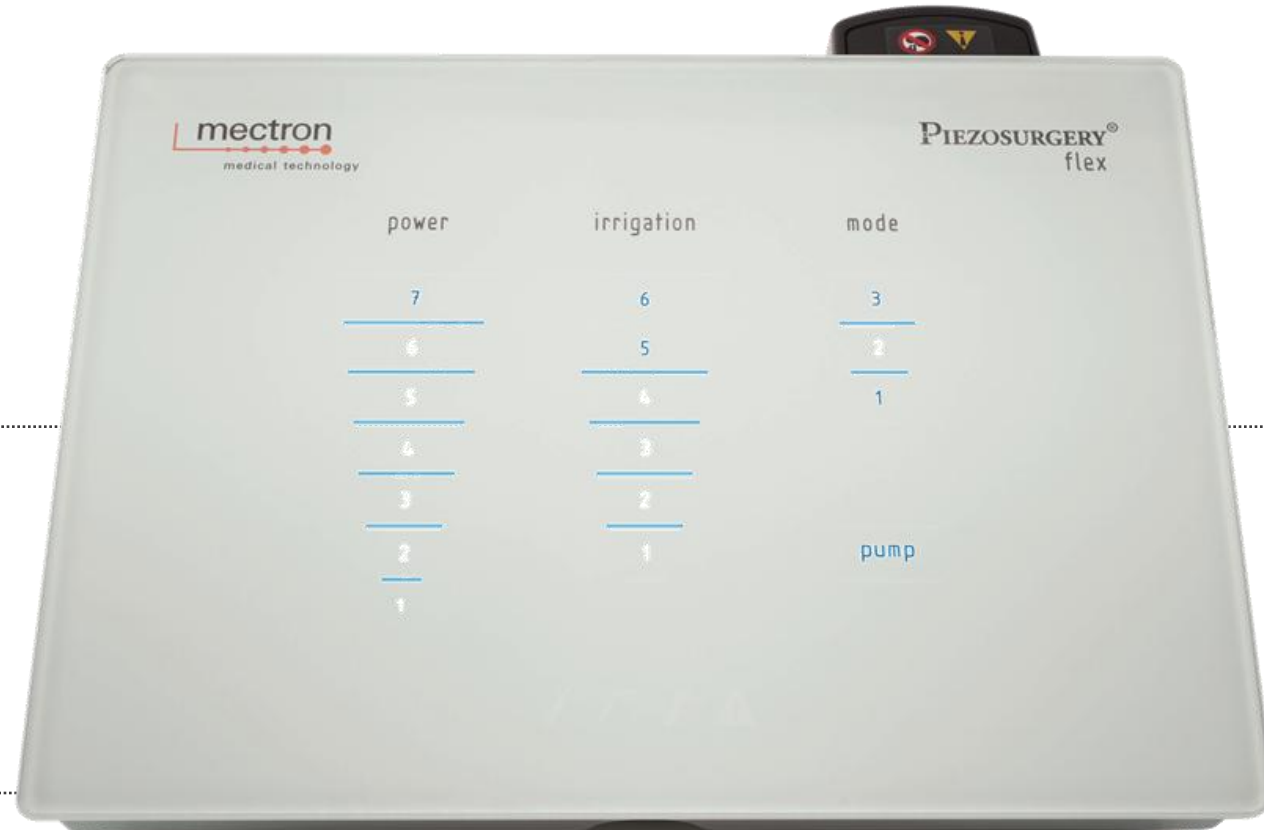

→ IDEALNY START

→ USTAWIENIA-MODE

- Oferują najlepszą wydajność chirurgiczną dla każdej końcówki chirurgicznej

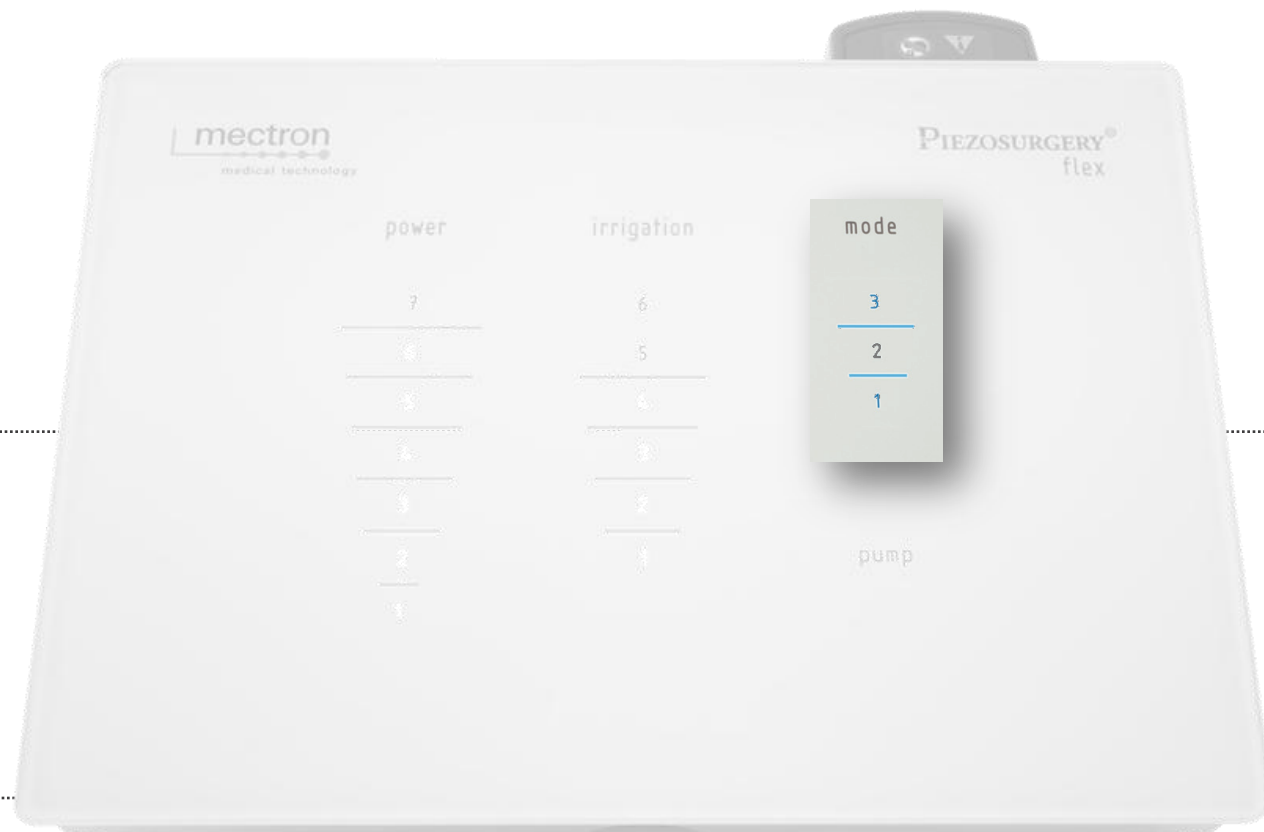

- 1: dedykowany najbardziej delikatnym operacjom i podniesieniu błony zatokowej**
- 2: dedykowany do cięcia i do usuwania zmineralizowanej kości**
- 3: dedykowany do cięcia i usuwania bardzo grubej zmineralizowanej kości**


→ IDEALNY START

→ AUTOMATYCZNE SYSTEM

- Automatycznie monitoruje i dostosowuje strojenie częstotliwości wibracji dla każdej końcówki.

→ TABELA USTAWIEŃ

- Zalecane parametry (tryb, moc i nawadnianie) zawsze zapewniają najlepszą wydajność dla każdej końcówki

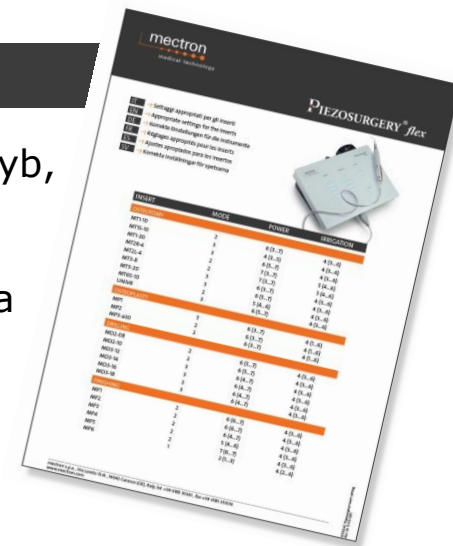

PIEZOSURGERY^{flex}

Settings summary per all modes:
 - Recommended settings for the device
 - Indicated appropriate power for the mode
 - Control is recommended for optimum

MODE	MODE	POWER	WATER
RTS-10	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-20	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-30	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-40	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-50	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-60	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-70	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-80	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-90	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-100	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-110	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-120	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-130	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-140	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-150	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-160	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-170	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-180	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-190	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-200	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-210	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-220	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-230	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-240	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-250	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-260	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-270	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-280	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-290	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-300	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-310	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-320	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-330	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-340	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-350	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-360	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-370	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-380	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-390	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-400	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-410	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-420	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-430	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-440	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-450	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-460	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-470	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-480	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-490	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-500	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-510	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-520	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-530	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-540	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-550	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-560	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-570	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-580	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-590	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-600	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-610	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-620	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-630	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-640	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-650	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-660	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-670	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-680	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-690	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-700	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-710	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-720	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-730	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-740	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-750	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-760	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-770	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-780	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-790	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-800	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-810	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-820	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-830	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-840	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-850	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-860	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-870	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-880	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-890	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-900	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-910	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-920	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-930	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-940	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-950	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-960	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-970	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-980	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-990	2	4.0-7.0	4.0-4.0
RTS-1000	2	4.0-7.0	4.0-4.0

→ KOMPAKTOWY & PRZENOŚNY



- Wygodna walizka do przemieszczania PIEZOSURGERY^{flex} jeśli to jest niezbędne.

→ WYGODA NA BLOKU OPER.

- Dotykowy panel
- Zewnętrzny system nawadniania
- 3m przewód rękojeści
- 5m kabel zasilający

